

# FICHE PRATIQUE 38

## OUVERTURE/FERMETURE DASRI



**Assemblage** : aligner le couvercle sur le collecteur puis appuyez fortement sur les coins du couvercle jusqu'à entendre un « click »



**Utilisation correcte du container**



**Ouverture** : tourner la partie ronde du couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « click »



**Fermeture** : tourner la partie ronde du couvercle dans le sens INVERSE des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « click »




### FERMETURE DEFINITIVE


1/ Vérifier que le couvercle soit complètement tourné dans le sens INVERSE des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « click »

2/ Appuyer avec les 2 pouces sur les points indiqués de la partie jaune dans l'ordre montré sur les images jusqu'à entendre les « clicks » qui indiquent que le container est fermé définitivement

### FONCTIONNALITES DU COUVERCLE

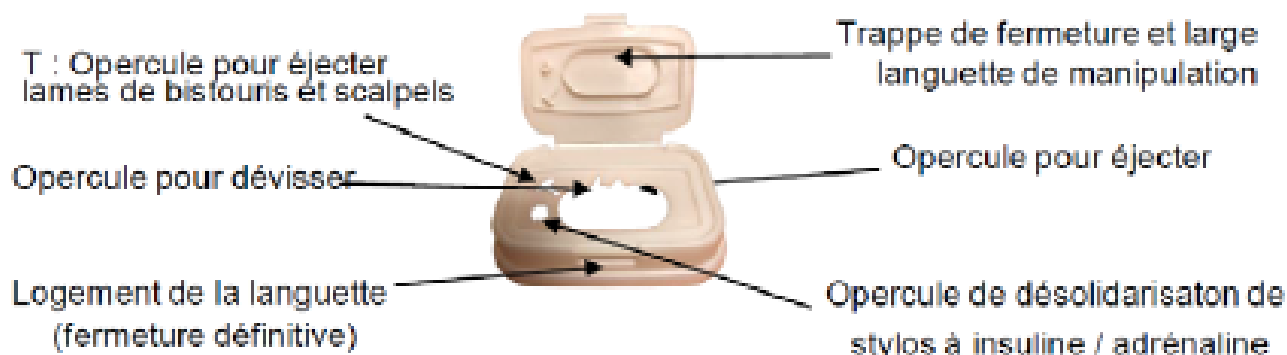

### MONTAGE et FIXATION

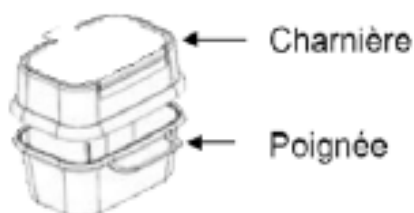

1. Présenter le couvercle au dessus de la cuve, avec la charnière du couvercle côté poignée



2. Exercer une pression coin par coin (4 « clics ») sur le couvercle jusqu'à l'assemblage complet sur la cuve.

### FERMETURE DEFINITIVE

1. Plier la languette vers le bas



2. Refermer la trappe en vérifiant que la languette rentre dans son logement  
3. Puis presser fortement sur la trappe en un point central

Le « clic » assure la fermeture définitive

**Respecter la limite de remplissage**

